

# MANUAL DE USO


## TEST DE ANTÍGENO SARS-COV-2




Aplica solo test de antígeno en 3 pasos, subsidiados por Minsal.

Antes de comenzar lávese las manos con agua y jabón o desinfectante para manos. Abra el paquete del hisopo por el extremo del palillo y sáquelo (sin tocar la cabeza del hisopo).

### RECOGIDA DE MUESTRAS

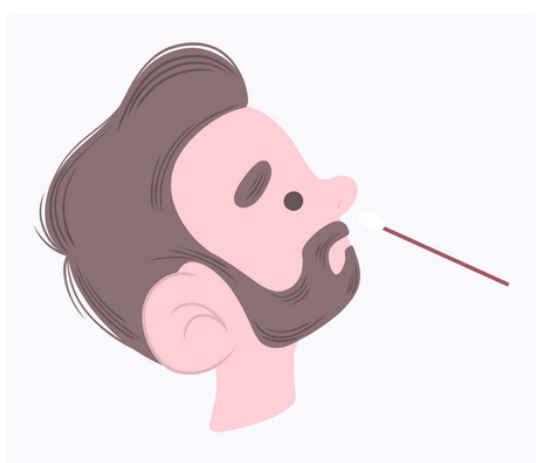

Inserte el hisopo estéril en una fosa nasal. Asegúrese de que toda la punta esté en la fosa nasal (aproximadamente 1,5 cm).

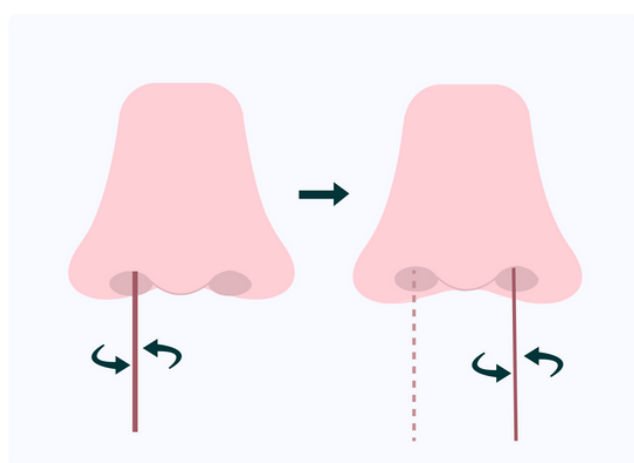

Enrolle el hisopo 5 veces dentro de la fosa nasal. Repita el proceso en la otra fosa nasal (con el mismo hisopo).


### MANIPULACIÓN DE MUESTRAS

Las muestras deben analizarse lo antes posible después de la recolección (recomendamos analizarlas dentro de los 5 minutos).


### PROCEDIMIENTO DE PRUEBA



Abra el tubo sellado con la solución de extracción e inserte el hisopo con la muestra.

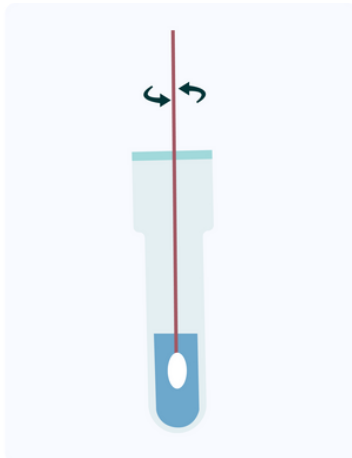


Enrolle el hisopo 5 veces mientras presiona el cabezal contra la parte inferior y lateral del tubo de extracción.

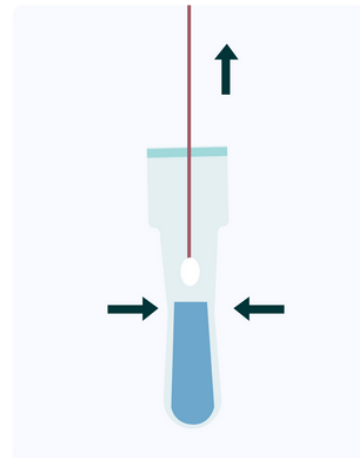

Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo para extraer el líquido del hisopo.



Coloque la punta del tubo.

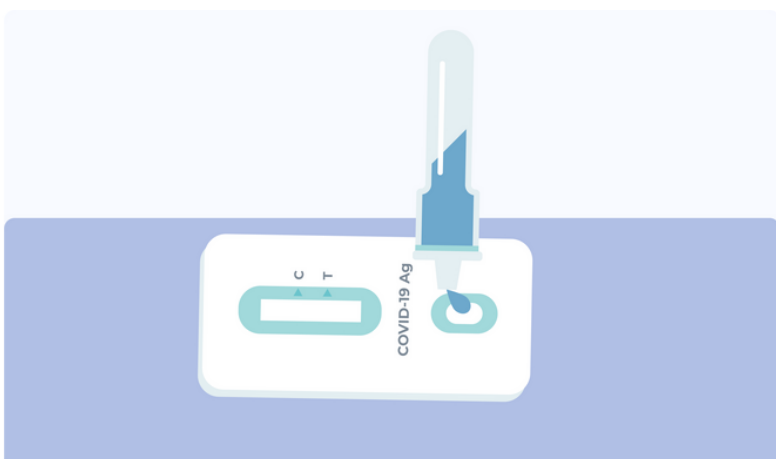

Coloque el dispositivo de prueba en una superficie limpia y nivelada. Aplique 3 gotas de la muestra extraída sin burbujas en el pocillo de muestra.

### INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS



Lea el resultado a los 15 minutos. No debe pasar los 20 minutos.

Ver instructivo  
¿Cómo interpretar el resultado?